


Desorientierten-Fürsorge-System

The logo for SE|CARE, featuring the letters 'SE' in red, a vertical bar, and 'CARE' in grey, all set against a horizontal red gradient bar.

SE|CARE

Bedienungsanleitung

Rücksetz-Einheit mit Displayanzeige

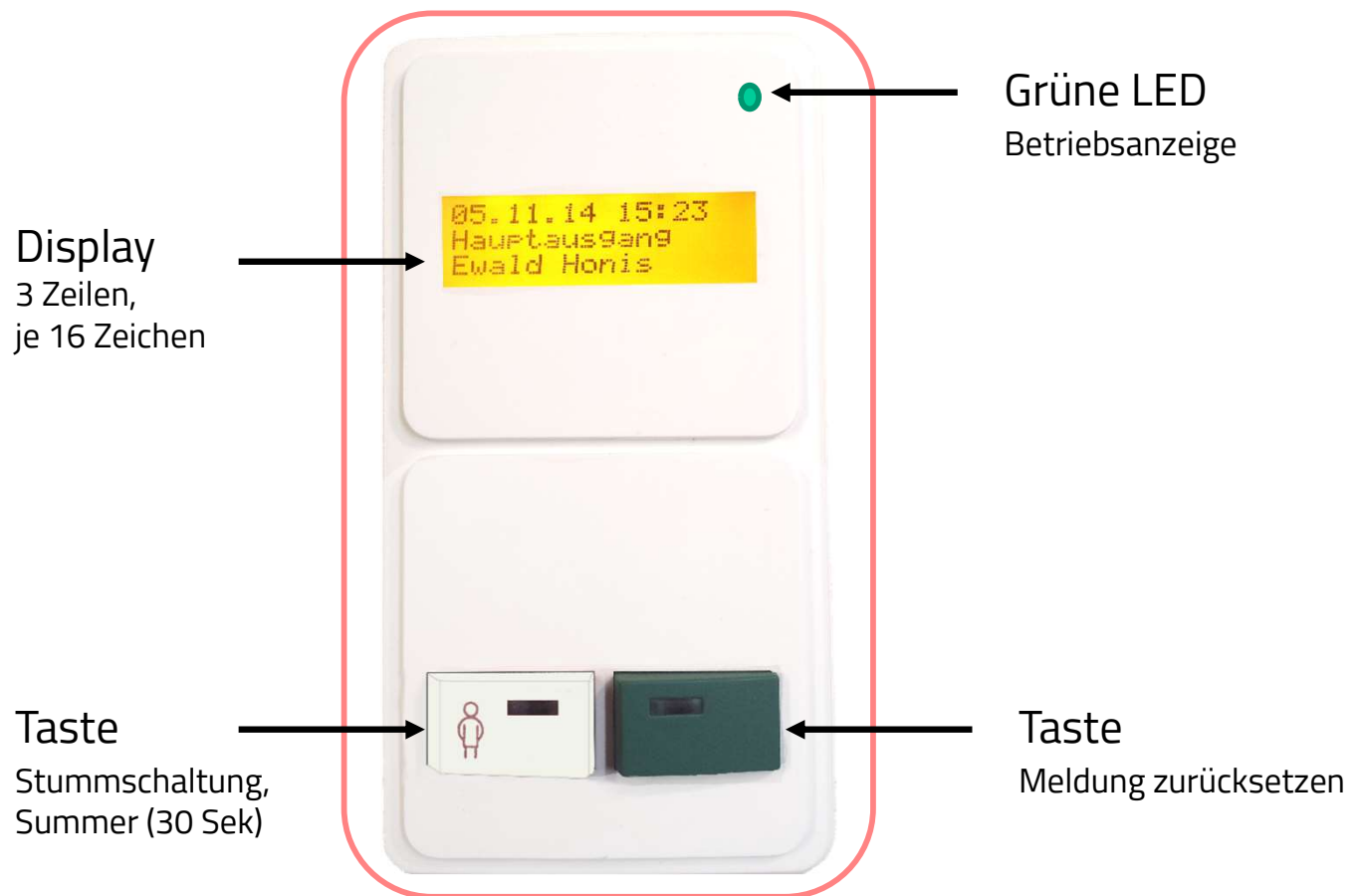

Die Rücksetz-Einheit mit Display dient zur Information und zum Quittieren bzw. Rücksetzen aktuell anstehender Meldungen, die durch das SECARE-DFS-System erzeugt werden.

Im Display wird der Name der erfassten Person sowie der Ort, an dem die Person erfasst wurde, angezeigt.



Wenn die grüne LED nicht leuchtet liegt eine Systemstörung vor!
Bitte benachrichtigen Sie den Service!

Funktion:

Zur Anzeige eines Rufereignisses wird zuerst die Display-Beleuchtung angeschaltet. Auf Wunsch wird ein akustisches Signal ausgegeben, das alle vier Sekunden wiederholt wird. Die Meldung wird im Display im Klartext mit Name und Ort der Erfassung angezeigt.

Es werden bis zu 4 Meldungen sequenziell hintereinander angezeigt, bis zu 32 Meldungen können im Speicher enthalten sein.

Bedienung:

Wir das optionale akustische Signal an der Rücksetzeinheit ausgegeben, kann dieses durch Drücken der weißen Taste für 30 Sekunden unterdrückt werden. Danach setzt es erneut ein.

Durch Drücken der grünen Taste wird eine Meldung zurückgesetzt.

Werden mehrere Meldungen hintereinander angezeigt, so wird beim Drücken der grünen Taste genau diejenige Meldung zurückgesetzt, die zu diesem Zeitpunkt gerade im Display erscheint. Die restlichen, verbliebenen Meldungen werden nach wie vor sequenziell hintereinander angezeigt und müssen jeweils einzeln zurückgesetzt werden.

Abruf der Historie

Befindet sich keine Meldung mehr im Display, kann durch Drücken der weißen Taste die Historie der letzten 32 Meldungen aufgerufen werden. Mit der grünen Taste können diese Meldungen der Reihenfolge nach durchgeschaltet werden. 10 Sekunden nach der letzten Bedienung kehrt das Display wieder in den normalen Anzeigemodus zurück.

Nutzen Sie unsere dreißigjährige Erfahrung im Bereich Lichttruf, Desorientierten-Fürsorge-Systeme DFS und Zutrittskontrolle. Durch unsere Expertise im Bereich der Sicherheitstechnik bieten wir ihnen die erforderliche Qualifikation für die Installation der Systeme in ihrem Haus!

The logo for SECARE, featuring the word "SECARE" in a bold, sans-serif font. The "SE" is in red, and the "CARE" is in grey. A vertical line separates the "SE" and "CARE" parts. The logo is positioned on the left side of a horizontal bar that has a red-to-white gradient.

SECARE GmbH
Gerhard Pfünder
Vertrieb

Tel: 0881-4178901
Mobil: 0176-19499-194
gerhard.pfuender@secare.eu
info@secare.eu
www.secare.eu