Desorientierten-Fürsorge-System DFS


SEICARE

Bedienungsanleitung


Transponderadministration

SE CARE

Um Transponder des Desorientierten-Fürsorge-Systems im SECARE-System einem Bewohner oder einer Person des Pflegebetriebs oder der Verwaltung zuzuweisen, muss das Konfigurationsmenü in der SECARE-Zentrale geöffnet werden. Dann im Drop-Down Menü den Punkt "Personen" auswählen.

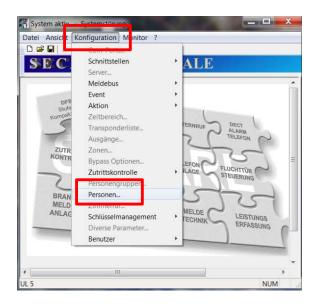


Es öffnet sich dieses Fenster:

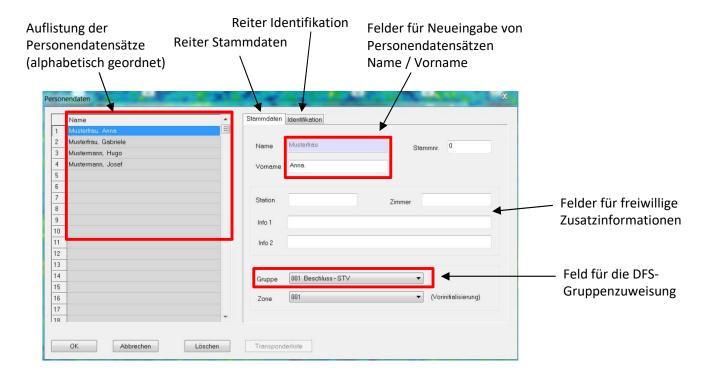

Auf der linken Seite werden die bereits bestehenden Personendatensätze angezeigt. Die Auflistung erfolgt alphabetisch.

SE CARE


1) Einen neuen Personendatensatz erstellen: Zuerst eine neue Zeile wählen!

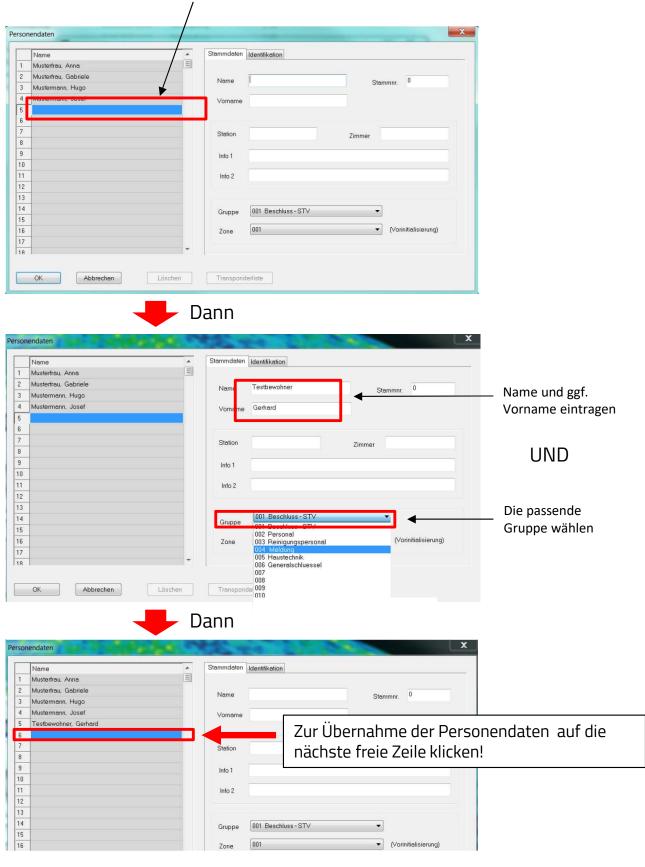




2) Einer Person einen zusätzlichen / neuen Transponder zuweisen

Den Personendatensatz auswählen, DANACH auf den Reiter "Identifikation" klicken

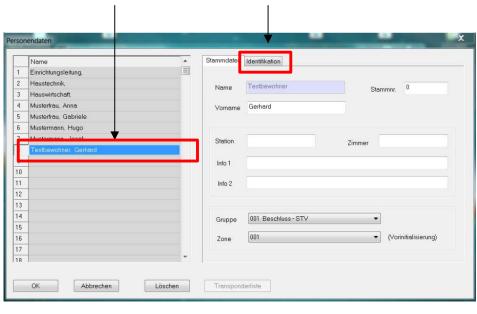



Die logische ID / Nummer(n) der vorgesehenen Transponder in die weißen Felder eintragen

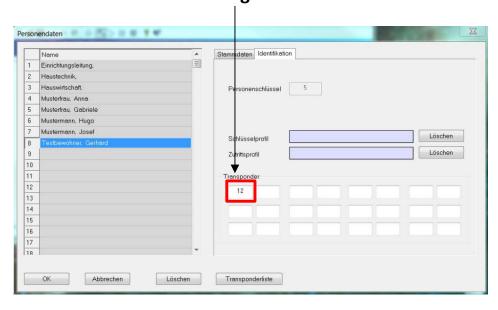



Zum Abschluss "OK" drücken, damit sind die Daten gesichert und sofort aktiv

Nutzen Sie unsere dreißigjährige Erfahrung im Bereich Lichtruf, Desorientierten-Fürsorge-Systeme DFS und Zutrittskontrolle. Durch unsere Expertise im Bereich der Sicherheitstechnik bieten wir ihnen die erforderliche Qualifikation für die Installation der Systeme in ihrem Haus!

SE CARE

SECARE GmbH Gerhard Pfünder Vertrieb

Tel: 0881-4178901

Mobil: 0176-19499-194

gerhard.pfuender@secare.eu

info@secare.eu www.secare.eu