

Desorientierten-Fürsorge-System DFS

The logo for SE|CARE, featuring the letters 'SE' in red, a vertical bar, and 'CARE' in grey, all set against a red gradient background bar.

SE|CARE

Bedienungsanleitung

Neue Transponder einlesen

Um Transponder des Desorientierten-Fürsorge-Systems in das SECARE-System einzulesen benötigen Sie:

- Die Transponder, die Sie einlernen wollen
- Eine geeignete Zugangsberechtigung (Benutzername / Passwort)
- Freie Plätze in der Transponderliste bzw.
- Ggf. eine Erweiterungslizenz


Schritt 1:

Einloggen ins System mit
Benutzername und Passwort.



Schritt 2:


Im Reiter „Konfiguration“ die
„Transponderliste“ auswählen

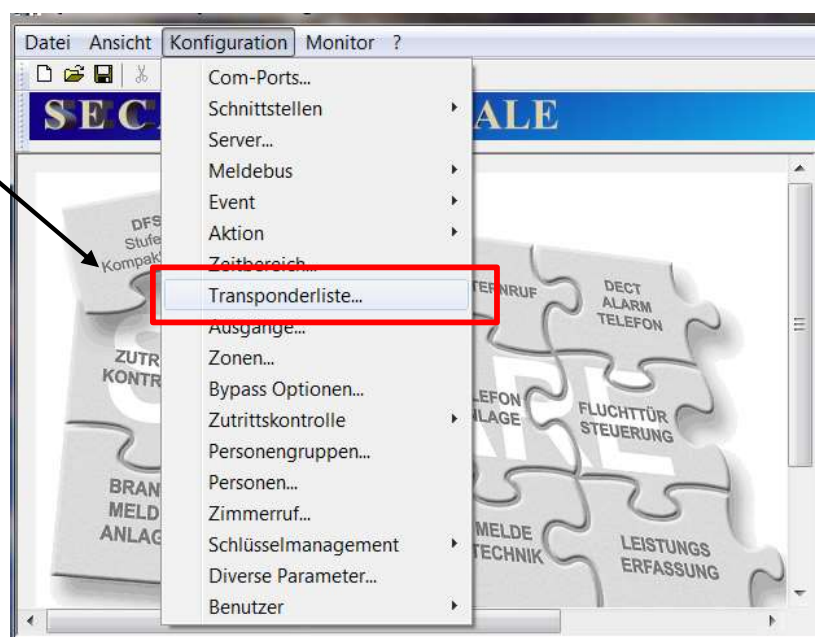

Schritt 3:

Mit dem Mauszeiger entweder:

- Eine freie Zeile auswählen oder
- Einen Transponderplatz, der gelöscht werden soll.

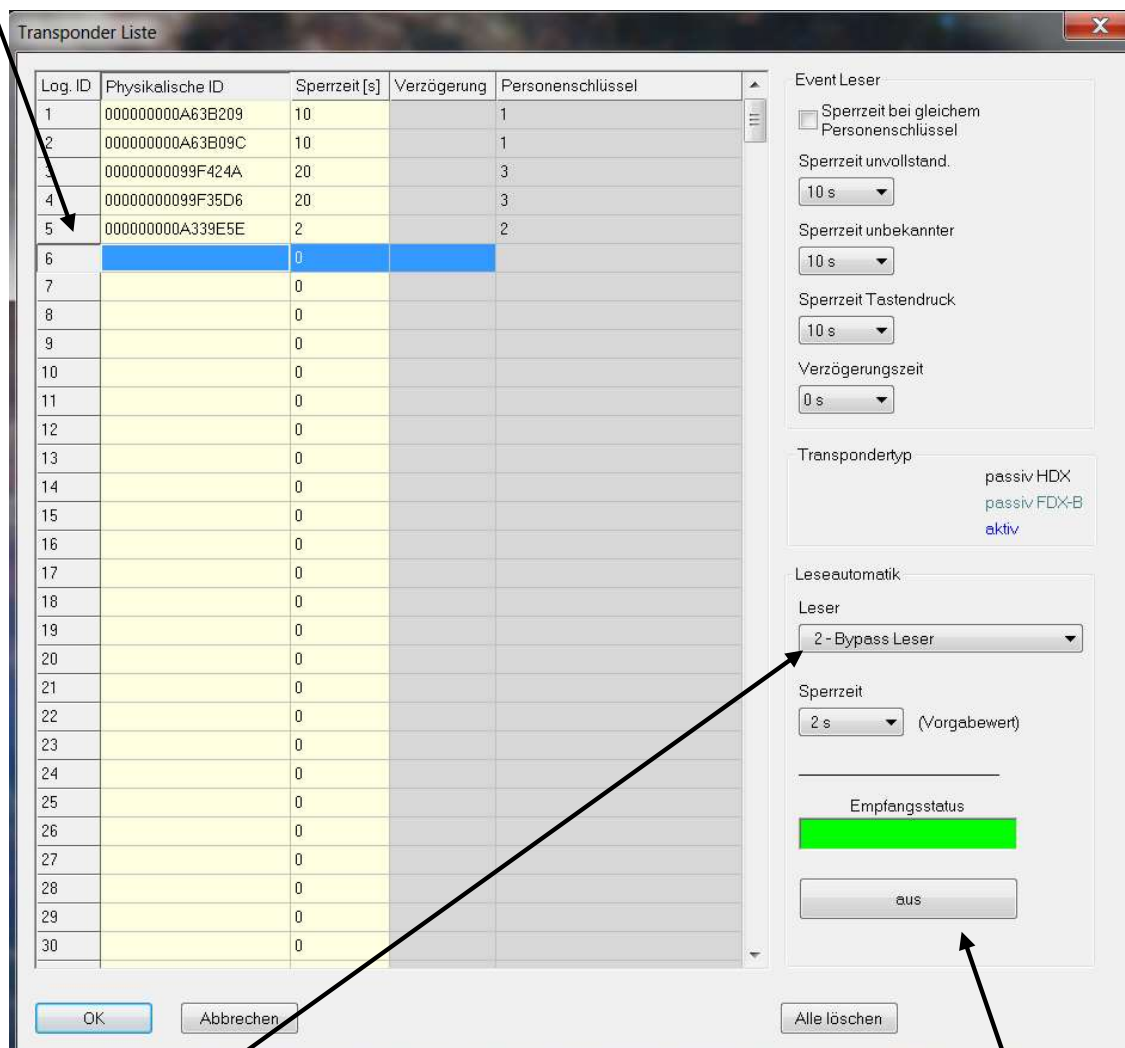

Schritt 4:

Einen Leser auswählen, mit dem Sie die neuen Transponder einlesen wollen.
(üblicherweise der Adminleser)

Schritt 5:

Empfangsstatus aktivieren durch Klicken auf „aus“,
die Anzeige wechselt auf „ein“

Schritt 6:

An dem Leser, den Sie vorher ausgewählt haben (s. Schritt 4) können Sie nun nacheinander alle Transponder einlesen. Der Cursor springt nach dem erfolgreichen Lesevorgang automatisch auf die nächste Zeile. **Steht in der nächsten Zeile bereits ein Eintrag, wird dieser überschrieben! Ggf. eine andere Zeile wählen!**

Log. ID	Physikalische ID	Sperrzeit [s]	Verzögerung	Personenschlüssel
1	00000000A63B209	10		1
2	00000000A63B09C	10		1
3	0000000099F424A	20		3
4	0000000099F35D6	20		3
5	00000000A339E5E	2		2
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		

Event Leser

☐ Sperrzeit bei gleichem Personenschlüssel

Sperrzeit unvollständig: 10 s

Sperrzeit unbekannter: 10 s

Sperrzeit Tastendruck: 10 s

Verzögerungszeit: 0 s

Empfangsstatus: aus

Buttons: OK, Abbrechen, Alle löschen

Die Transponder erhalten nun automatisch **eine logische ID (Log ID)**. Am besten den Transponder gleich mit der zugewiesenen Log ID beschriften!

Schritt 7:

Ausschalten der Leseautomatik, Anzeige wechselt auf „aus“

Schritt 8:

Nachdem Sie alle Transponder eingelesen haben, müssen Sie die Liste **mit „OK“ noch abspeichern!** Sonst werden die Transponder nicht übernommen!

Schritt 9: den **Benutzer abmelden**, jedoch nicht die SE|CARE-Software schließen/beenden!

Nutzen Sie unsere dreißigjährige Erfahrung im Bereich Lichttruf, Desorientierten-Fürsorge-Systeme DFS und Zutrittskontrolle. Durch unsere Expertise im Bereich der Sicherheitstechnik bieten wir ihnen die erforderliche Qualifikation für die Installation der Systeme in ihrem Haus!

The logo for SECARE, featuring the word "SECARE" in a bold, sans-serif font. The "SE" is in red, and the "CARE" is in grey. A vertical line separates the "SE" and "CARE" parts. The logo is positioned on the left side of a horizontal bar that has a red-to-white gradient.

SECARE GmbH
Gerhard Pfünder
Vertrieb

Tel: 0881-4178901
Mobil: 0176-19499-194
gerhard.pfuender@secare.eu
info@secare.eu
www.secare.eu