


Lichtruf-System

The logo for SE|CARE, featuring the letters 'SE' in red, a vertical bar, and 'CARE' in grey, all set against a horizontal red gradient bar.

SE|CARE

Bedienungsanleitung

Dienstzimmer-Einheit mit Displayanzeige

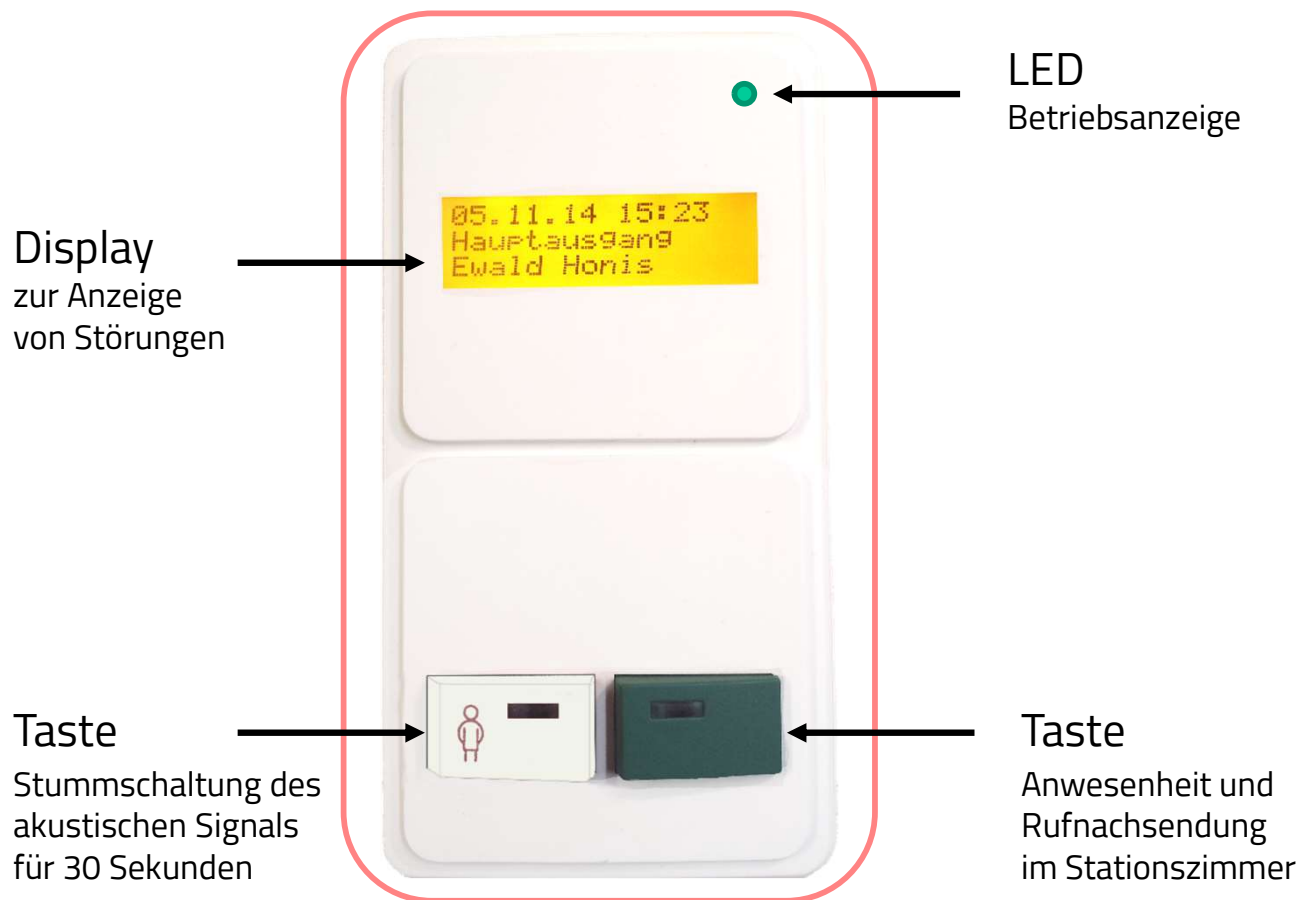

Die Dienstzimmereinheit mit Display dient zur systemeigenen Information und Übersicht über aktuell anstehende Störungen und ggf. auch Meldungen, die durch das SECARE-System erzeugt werden.

Es können **optional** auch die Informationen der Lichtrufanlage, des Desorientierten-Fürsorge-Systems oder auch externer Systeme – wie z.B. einer Brandmeldeanlage, z.B. „stiller Alarm“ angezeigt werden. Dies ist von der Konfiguration und den Schnittstellen abhängig.

Normalbetrieb:

Im Normalbetrieb leuchtet die grüne LED, das Display ist nicht beleuchtet und enthält keine Textmitteilung

Bedienung-Normalbetrieb:

Durch Drücken der grünen Taste wird die Anwesenheit im Dienstzimmer gesetzt. Dadurch wird vorrangig die Rufnachsendung im Dienstzimmer etabliert. Optional können im Display per Klartext die Meldungen der Lichtrufanlage, der DFS-Anlage und sonstiger angeschalteten Anlagen angezeigt werden. Stehen mehrere Meldungen an, werden diese im 5-Sekundentakt nacheinander angezeigt.

Durch Drücken der weißen Taste kann das akustische Signal für 30 Sekunden unterdrückt werden. Danach setzt es erneut ein.

Störmeldungs-Funktion:

Zur Anzeige einer Störmeldung wird zuerst die Display-Beleuchtung angeschaltet. Ein akustisches Signal wird ausgegeben, das alle 30 Sekunden wiederholt wird. Die Meldung wird im Display im Klartext angezeigt.

Ausfall der Zentralen-Komponenten

Beim Ausfall der SECARE-Zentrale **erlischt** die grüne LED, die Display-Beleuchtung wird angeschaltet und ein entsprechender Meldetext sowie ein akustisches Signal ausgegeben.

 **ACHTUNG – Es wird keine Meldung mehr an die DECT-Handsets ausgegeben!**

Ausfall von Zimmer-Komponenten etc.

Beim Ausfall eines Daten-Busses, einer Zimmer-Komponente oder einer Spannungsversorgung leuchtet die grüne LED weiterhin, die Display-Beleuchtung wird angeschaltet, ein Meldetext angezeigt und ein akustisches Signal ausgegeben.

 **Im Störfall muss die eingewiesene Person benachrichtigt werden und die Beseitigung der Störung organisieren!**

Nutzen Sie unsere dreißigjährige Erfahrung im Bereich Lichttruf, Desorientierten-Fürsorge-Systeme DFS und Zutrittskontrolle. Durch unsere Expertise im Bereich der Sicherheitstechnik bieten wir ihnen die erforderliche Qualifikation für die Installation der Systeme in ihrem Haus!

The logo for SECARE, featuring the word "SECARE" in a bold, sans-serif font. The "SE" is in red, and the "CARE" is in grey. A vertical line separates the "SE" and "CARE" parts. The logo is positioned on the left side of a horizontal bar that has a red-to-white gradient.

SECARE GmbH
Gerhard Pfünder
Vertrieb

Tel: 0881-4178901
Mobil: 0176-19499-194
gerhard.pfuender@secare.eu
info@secare.eu
www.secare.eu